

**Procedura dotyczy:**

- osób korzystających z narzędzi chirurgicznych służących przy wykonaniu sekcji zwłok
- lekarza przeprowadzającego sekcje zwłok
- osoby pomagającej przy sekcji zwłok

**Zasady:**

- Proces dezynfekcji należy przeprowadzić w wannie dezynfekcyjnej z sitem i szczelną pokrywą.
- Pojemność wanny musi być adekwatna do ilości narzędzi.
- Do dezynfekcji narzędzi używać preparatów dezynfekcyjnych o szerokim zakresie działania (oznaczenie preparatu B, F, V, Tbc, S).
- Wszystkie brudne narzędzia chirurgiczne należy bezpośrednio po użyciu rozpiąć i włożyć do wanny z przygotowanym środkiem dezynfekcyjnym. Środek dezynfekcyjny musi być przygotowany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nerki, miseczki, szpatułki stalowe i inny sprzęt (narzędzia) należy włożyć do wanny w taki sposób, aby nie pływały i były całkowicie zanurzone w środku.
- Po włożeniu do wanny dezynfekcyjnej ostatnich narzędzi należy: wannę szczelnie zamknąć, zaznaczyć godzinę rozpoczęcia i zakończenia dezynfekcji; czas dezynfekcji mierzy się od chwili włożenia ostatniego narzędzia.
- Należy ściśle przestrzegać czasu dezynfekcji (zgodnie z zaleceniami producenta).
- Po zakończeniu dezynfekcji wyjąć siatkę z narzędziami wstawić do zlewozmywaka i umyć narzędzia .
- Umyte narzędzia ułożyć na ręczniku jednorazowym, pozostawić do wysuszenia.
- Suche i czyste narzędzia przechowywać w czystej szafie.